

## READY TO USE DESINFEKTIONSTÜCHER

Aldehydfreie, gebrauchsfertige, parfüm- und farbstofffreie Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Flächen gem. EU-Biozidprodukteverordnung (EU-BPR).

- praktische Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen.
- gute Materialverträglichkeit. Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas, Kunststoffe und Kunstlederbezüge.
- Einwirkzeit nach VAH nur 1 Minute.
- geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren), Noroviren.
- geprüft nach den aktuellen VAH-Methoden
- geprüft im 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615.
- Tüchergröße: 300 x 200 mm.

## ANWENDUNG

Septiactive FDTM45 einzeln entnehmen. Zu desinfizierende Oberflächen und Gegenstände abwischen und Präparat einwirken lassen. Sichtbar kontaminierte Flächen mit Septiactive FDTM45 desinfizieren und Kontamination aufnehmen. Gereinigte Flächen noch einmal desinfizieren. Auf vollständige Benetzung während der gesamten Einwirkzeit achten. Nach Tuchentnahme Spenderbox sofort wieder verschließen. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH 1 Min. (bakterizid / levurozid), für Tb-Bakterien 2 Min. Eine Inaktivierung der Viren erfolgt bei 30 Sek.- 5 Min.

## MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Anwendung		Einwirkzeit
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion nach VAH	Bakterizid / Levurozid	1 min.

Wirkungsspektrum	Geprüft gemäß	Einwirkzeit
<b>Bakterien und Hefen</b>		
Bakterizid / Levurozid	EN 13727, EN 13624, EN 16615	1 min.
Tuberkulozid	EN 14348	2 min.
<b>Viren</b>		
Begrenzt viruzid (behüllte viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren)	EN 14476	30 sec.
	DVV/RKI-Leitlinie	30 sec.
Noroviren	EN 14476	5 min. <sup>1)</sup>
1) Prüfung unter geringer Belastung.		
Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Adeno-, Noroviren)	EN 14476	30 sec. <sup>1)</sup>
Polyomavirus SV40	DVV/RKI-Leitlinie	5 min.

1) Prüfung unter geringer Belastung: 1 Min.  
2) Prüfung unter geringer Belastung: 15 Min.



## PHYSIKALISCHE DATEN

Wirkstofflösung	
Aussehen:	klare, farblose Lösung
Dichte:	D = ca. 0,97 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)

## GUTACHTEN/LISTUNGEN

Geprüft unter geringer und hoher Belastung gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 sowie DVV/RKI-Leitlinie.

Biozid-Reg-Nr: Septiactive FDTM45 N-98215  
UFI-Code: GQ4A-39CG-X10Y-NP6E

## PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

Septiactive FDTM45 enthalten Septiactive FSD45, eine schnell wirkende Kombination von Alkoholen und Quartären Ammoniumverbindungen sowie Hilfsstoffen. 100 g Wirkstofflösung enthalten 17 g 1-Propanol, 0,125 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid, Hilfsstoffe und Wasser.

## HINWEISE

Bei empfindlichen Oberflächen Beständigkeit an verdeckter Stelle prüfen. Farbliche und geruchliche Veränderungen von Septiactive FDTM45 während der Lagerung führen zu keiner Beeinträchtigung der Wirksamkeit. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal.

Aufbereitung der Spenderbox inkl. Deckel: Verschmutzungen und Rückstände mechanisch ablösen und entfernen. Spenderbox inkl. Deckel innen und außen mit heißem Leitungswasser (> 55

°C – Achtung: Verbrühungsgefahr!) gründlich abspülen und mit Einmaltuch trocknen. Danach Spenderbox und Deckel mit einem Einmaltuch, getränkt mit alkoholischer Schnelldesinfektion, vollständig benetzen und gründlich desinfizieren (Einwirkzeit beachten!). Auf eine vollständige Abtrocknung achten.

Oder maschinelle Aufbereitung: Im Reinigungs- und Desinfektionsgerät bei bis zu 93 °C chemothermisch aufbereiten und trocknen.

### UMWELTINFORMATIONEN

Die Verpackung ist aus einem Verbundmaterial und thermisch verwertbar.

### LAGERUNG

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

3 Jahre; Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate

### PACKUNGSGRÖSSE

Bezeichnung	Format	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE	Spendersystem
SEPTIACTIVE FDTM 45	ca. 30 x 20 cm	100	6001100202050115000B	4 Rollen	Eimer „maxi“

### ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE
Spendereimer maxi	10560022510010600	1 Stück
Wandhalter eco maxi/XXL	110015601	1 Stück
Verschlussbügel zum Nachrüsten bei eco Wandhalter	110015901	1 Stück
Wandhalter eco safe maxi/XXL	110015701	1 Stück

### ENTSORGUNG

Gebrauchte Tücher über Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### GEFAHRENHINWEISE

Septiactive FDTM45 sind nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Stand 01/2023