

**READY TO USE DESINFEKTIONSTÜCHER ALKOHOLFREI**

Die gebrauchsfertigen Vliestücher dienen der umfassenden Schnelldesinfektion von Flächen und Gegenständen. Sie sind getränkt mit MediSept uni, einem gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen. Die Tränkflüssigkeit ist frei von Aldehyden, Phenol, Chlor und Alkali. Aufgrund der erstklassigen Vliesstoffqualität ist eine bestmögliche Wirkstoffabgabe gewährleistet.

- aldehyd-, phenol-, chlor- und alkalifrei
- auf Acrylglas anwendbar
- kurze Einwirkzeiten

Quick & easy uni Vliestücher haben sich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Alten- und Pflegeheimen, Rettungswagen sowie in Tattoo-, Piercing- und Kosmetikstudios bewährt. Zudem sind sie für den Einsatz in Gemeinschaftseinrichtungen und in Solarien geeignet. Gemäß der Biozid-Richtlinie eignen sich die Tücher zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen.

**ANWENDUNG**

Die Vliestuchrolle wird in das Spendersystem eingesetzt. Danach wird ein Desinfektionstuch aus der Rollenmitte genommen und durch die Entnahmeöffnung geführt. Anschließend wird das Spendersystem verschlossen. Die zu desinfizierende Fläche wird gleichmäßig und vollständig mit dem getränkten Vliestuch benetzt. Anschließend muss das Mittel einwirken und die desinfizierten Flächen müssen abtrocknen (siehe „Einwirkzeit“). Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen. Die alkoholfreien Desinfektionstücher sind geruchsneutral.

**MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT**

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept uni:

Wirkungsspektrum	Zeit
bakterizid inkl. MRSA, levurozid (bei hoher organischer Belastung)	1 Min.
wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Influenza	30 Sek.
Rota-Viren	30 Sek.
Papova-/Polyoma-Viren	2 Min.

**PHYSIKALISCHE DATEN**

Die Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit MediSept uni:-  
 Form / Farbe: klare, farblose Lösung  
 pH-Wert: 6-8



**GUTACHTEN/LISTUNGEN**

Die Tränkflüssigkeit MediSept uni ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittel-Liste des ÖGHMP. Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: N-58068

Sofern das Flächendesinfektionsmittel mit dem Referenztuch nach EN 16615 geprüft wurde, ist auch bei Verwendung eines WHR-Vliestuchs die Wirksamkeit der hygienischen Flächendesinfektion gemäß der Herstellerangaben gegeben.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG**

- 100 g MediSept uni enthalten:
- 0,50 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
- 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid

**UMWELTINFORMATIONEN**

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.

**GEFAHRENHINWEISE**

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise nach nationalen Vorschriften entsorgt werden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch Etikett, Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

## LIEFERFORMEN

Bezeichnung	Blattformat	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE
QUICK & EASY MEDIWIPES UNI	ca. 20 x 20 cm	500 Blatt	20095002010252170000	2 Rollen

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE
Spendereimer XXL	10620022510010500	5 Stück
Wandhalter eco maxi/XXL	110015601	1 Stück
Verschlussbügel zum Nachrüsten bei eco Wandhalter	110015901	1 Stück
Wandhalter eco safe maxi/XXL	110015701	1 Stück
Smartpoint div. Farben/Ausführungen	bitte seperaten Flyer beachten	1 Stück

Stand 01/2023